



SPRAY GELO

REF: VMD65

CARACTERÍSTICAS

Usado para aliviar a dor causada por trauma, contusões, ou entorses. Agite a lata. Pulverizar uniformemente a uma distância de cerca de 20 cm, não mais do que 3/4 segundos. Repita este procedimento 2-3 vezes intervalos curtos. Não aplicar o produto, segurando-o muito próxima da pele ou durante demasiado tempo, de modo a não causar uma queimadura do frio. Limitações de uso: antes de usar o produto verifique se a pessoa não apresenta doenças ou estados físicos particulares.

**CAIXA**
12 UND**EMBALAGEM DE**
400 ML**COR**
-**OBS**
CÓDIGO DE BARRAS
8032727740534